

OPI™

One-Piece Implant

OPI™



Pilastro protesico integrato

- Abutment in titanio lucido;
- Il colletto concavo genera un ambiente ideale per la crescita dei tessuti molli e previene il riassorbimento osseo.



Trattamento di superficie selettivo


- Trattamento di superficie selettivo;
- Pulizia superficiale senza compromessi;
- Risultati EDS ed XPS eccellenti.



Corpo implantare

- Elevata stabilità primaria;
- Espansione conica del corpo implantare;
- Disponibile in due diametri: 3,0 mm e 3,3 mm ed in diverse altezze di 10 mm, 11,5 mm, 13 mm e 16 mm.



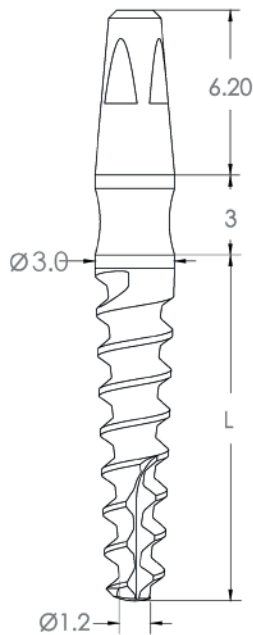

Caratteristiche peculiari

- Impianto monocomponente autofilettante con pilastro protesico integrato progettato per una procedura chirurgica monofasica e indicato per restauri protesici cementati;
- Carico immediato.

Design a spira singola

- Il design del profilo ad osteocondensazione graduale migliora la stabilità primaria;
- Il coefficiente di penetrazione degli impianti OPTM è di 1,5 millimetri in rotazione;
- Penetrazione ossea tagliente e precisa.



Design ad apice stretto

- Apice con spire autofilettanti necessitano di osteotomia minimale;
- La caratteristica autofilettante determina anche un preciso adattamento delle spire alla superficie ossea, condizione necessaria all'ottenimento di una stabilità primaria ottimale;
- Elevata semplicità di inserimento ed ottimizzazione direzionale nelle fasi iniziali.

OPI™ Matrix

One-Piece Implant

OPI™



Codici catalogo


Lunghezza	10 mm	11.5 mm	13 mm	16 mm
 Ø 3.00 mm	opi1030	opi1130	opi1330	opi1630
 Ø 3.30 mm	opi1033	opi1133	opi1333	opi1633



TSQK-200340

Chiave manuale per cricchetto
a connessione esterna

Lunghezza: 21mm.

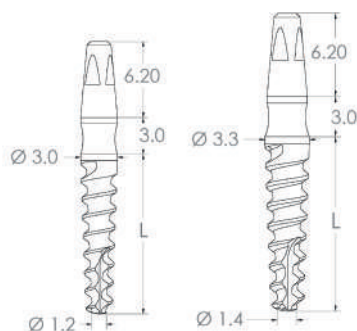

Sequenza frese

Qualità ossea

	I,II	RPM
 Ø 3.00 mm	Ø 1.9 mm Ø 2.0 mm Ø 2.5 mm	1200-1500 900-1200 700-900
 Ø 3.30 mm	Ø 1.9 mm Ø 2.0 mm Ø 2.5 mm Ø 2.8 mm	1200-1500 900-1200 700-900 400-700

Qualità ossea

III,IV	RPM
Ø 1.9 mm Ø 2.0 mm	1200-1500 900-1200
Ø 1.9 mm Ø 2.0 mm Ø 2.5 mm	1200-1500 900-1200 700-900

Non superare i 60Ncm durante l'inserimento dell'impianto.